

NEODENT[®] GRAND MORSE
BASES DE TITÂNIO

UMA SOLUÇÃO PROTÉTICA PARA TODAS AS INDICAÇÕES.



DIFERENCIE O SEU CONSULTÓRIO

DÊ RESPOSTA ÀS EXPECTATIVAS DOS PACIENTES, OFERECENDO OPÇÕES ABRANGENTES DE TRATAMENTO DE RESTAURAÇÃO

As Bases de titânio Neodent® GM contribuem para dar resposta às expectativas de uma estética natural por parte dos doentes, tendo em conta as necessidades individuais, através de uma série de opções abrangentes de restauração. Uma escolha de pilar protético que oferece uma solução de tratamento flexível para todas as indicações: da restauração unitária à restauração múltipla, com canal de parafuso reto ou angulado, com uma prótese cimentada ou aparafusada, permitindo um fluxo de trabalho digital ou convencional para sistemas fechados e abertos.

BASE DE TITÂNIO NEODENT®

- Restauração unitária
- Várias alturas gengivais (desde 0,8 a 4,5 mm)
- Vários diâmetros de pilar (3,5, 4,5, 5,5 e 6,5 mm)
- Altura cimentável: 4,0 ou 6,0 mm
- Personalização da coroa e angulação máxima de 30°
- Parafuso amovível
- Roscas internas para facilitar a remoção do parafuso e pilar utilizando condutores especiais

	GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
4 mm	Ø 3,5	135.355	135.356	135.357	135.358	135.359
	Ø 4,5	135.367	135.368	135.369	135.370	135.371
	Ø 5,5	135.379	135.380	135.381	135.382	135.383
6 mm	Ø 6,5		135.391	135.392	135.393	135.394
	Ø 3,5	135.361	135.362	135.363	135.364	135.365
	Ø 4,5	135.373	135.374	135.375	135.376	135.377
	Ø 5,5	135.385	135.386	135.387	135.388	135.389
	Ø 6,5		135.395	135.396	135.397	135.398

BASES DE TITÂNIO NEODENT® PARA SOLUÇÃO ANGULADA*

- Restauração unitária
- Várias alturas gengivais (desde 0,8 a 2,5 mm)
- Vários diâmetros de pilar (3,5, 4,5 e 5,5 mm)
- Altura cimentável: 4,0 ou 6,0 mm
- Personalização da coroa e angulação máxima de 25° na altura gengival e área cimentável
- Parafuso amovível

	GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
4 mm	Ø 4,0	135.327	135.328	135.329
	Ø 4,5	135.333	135.334	135.335
	Ø 5,5	135.339	135.340	135.341
6 mm	Ø 4,0	135.330	135.331	135.332
	Ø 4,5	135.336	135.337	135.338
	Ø 5,5	135.342	135.343	135.344

* Nem todos os produtos estarão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu distribuidor para obter mais informações.

FLUXO DE TRABALHO DIGITAL



FLUXO DE TRABALHO CONVENCIONAL



BASE DE TITÂNIO NEODENT® PARA PONTE

- Restauração múltipla
- Várias alturas gengivais (desde 0,8 a 4,5 mm)
- Vários diâmetros de pilar (3,5, 4,5 e 5,5 mm)
- Altura cimentável: 4,0 para Ø3,5 ou 4,5 para Ø4,5 e Ø5,5 mm
- Parafuso amovível
- Roscas internas para facilitar a remoção do parafuso e pilar utilizando condutores especiais

GH	0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
Ø 3,5	135.399	135.400	135.401	135.402	135.403
Ø 4,5	135.404	135.405	135.406	135.407	135.408
Ø 5,5	135.409	135.410	135.411	135.412	135.413



BASE DE TITÂNIO NEODENT® C

- Restauração unitária
- Para fluxo de trabalho CEREC
- Várias alturas gengivais (desde 0,8 a 4,5 mm)
- Área cimentável: 4,7 mm
- Permite a personalização da coroa e angulação máxima de 20°
- Parafuso amovível
- Roscas internas para facilitar a remoção do parafuso e pilar utilizando condutores especiais

0,8 mm	1,5 mm	2,5 mm
135.349	135.350	135.351
3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm
135.352	135.353	135.354

RESTAURAÇÃO FINAL

FRESAGEM

Frese a prótese desenhada no software CAD.

ACABAMENTO

Modelo impresso.

Análogo de implante GM



Híbrido reposicionável (convencional/digital)
 Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0
 101.103 101.089 101.090

4

MOLDAGEM

Produza as estruturas protéticas utilizando as capas de saturação.

Coping calcinável com base de titânio GM



Ø 3,5	Ø 4,5	Ø 5,5	
118.322	118.325	118.329	4,0 mm
118.323	118.327	118.342	6,0 mm

ACABAMENTO

Modelo de gesso.

Análogo de implante GM



Híbrido reposicionável (convencional/digital)
 Ø 3,5/3,75 Ø 4,0/4,3 Ø 5,0/6,0
 101.103 101.089 101.090



© 2022 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados.
Neodent®, Grand Morse® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da JJGC Indústria e Comércio de

Materiais Dentários S.A.

3Shape é uma marca comercial ou marca comercial registada da 3Shape A/S.

CARES é uma marca comercial ou marca comercial registada da Straumann Holding AG.

Dental Wings é uma marca comercial ou marca comercial registada da Dental Wings Inc.

CEREC é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sirona Dental Systems GmbH.

Exocad é uma marca comercial ou marca comercial registada da exocad GmbH.

Nem todos os produtos estarão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu distribuidor para mais informações.

10123_neodent_tibase_brochure_pt_pt_B00_lr_300822