


Straumann® Pro Arch TLX

# GUIDE RAPIDE

## EXAMEN PRÉOPÉRATOIRE

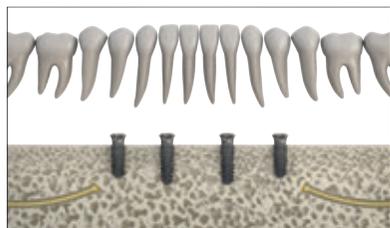

Volume osseux qui définira la mise en place des implants



Répartition antéro-postérieure : répartition des implants antérieurs / postérieurs



Préparation en laboratoire : restauration provisoire et modèle d'étude (facultatif)

## FLUX DE TRAVAIL CHIRURGICAL



Situation clinique et préparation de la crête



Pose des implants TLX




Pose de la partie secondaire provisoire directement sur les implants TLX. Réduction de la longueur de la partie secondaire le cas échéant




Protection du trou d'accès à la vis afin d'éviter l'injection de résine acrylique dans le puits de vissage



Positionnement de la restauration provisoire pour le transfert des parties secondaires

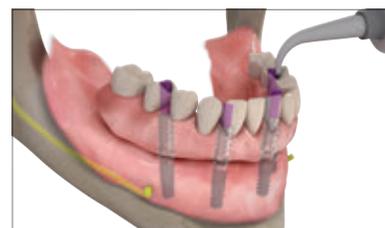


Injection de résine acrylique autour des parties secondaires

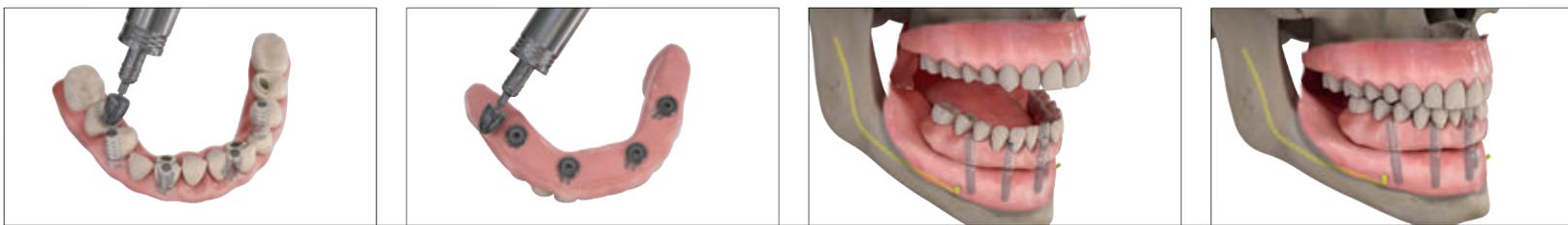

Finalisation et polissage de la restauration provisoire avant la dernière vérification occlusale

## PRÉPARATION DE LA RESTAURATION DÉFINITIVE AU CABINET ET AU LABORATOIRE DENTAIRE

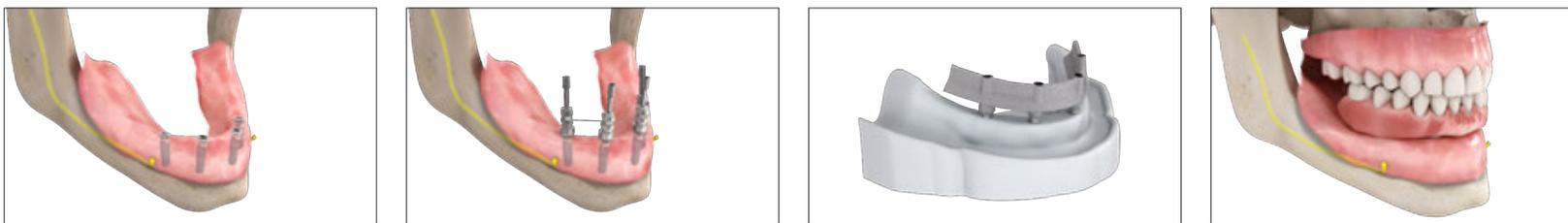

Retrait de la restauration provisoire, prise d'empreinte à l'aide des composants pour porte-empreinte ouvert ou prise d'empreinte numérique avec corps de scannage, fabrication de la prothèse fixe définitive en utilisant une structure sur-mesure

Pour obtenir plus d'informations, consulter le document *Système implantaire Straumann® TLX, Informations de base (702854/fr)*.

### International Headquarters

Institut Straumann AG  
 Peter Merian-Weg 12  
 CH-4002 Basel, Switzerland  
 Phone +41 (0)61 965 11 11  
 Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.