



**TUDO QUE  
VOCÊ PRECISA  
SABER ANTES DE ADQUIRIR O  
VIRTUO VIVO**



# HELLO

Eu sou o Dr. Edu Romagna, especialista em produtos digitais na Straumann Brasil e vou acompanhar contigo todos os passos com o seu scanner intraoral Virtuo Vivo.




O Virtuo Vivo é o scanner da Straumann desenvolvido para atender suas necessidades no primeiro estágio do fluxo digital, a obtenção de imagens, que poderão ser utilizadas para diagnósticos, planejamentos de cirurgias guiadas, alinhadores, reabilitações protéticas dento ou implanto suportadas, construção de modelos e demais finalidades.

**DEPOIS DESSE EBOOK VOCÊ ESTARÁ PRONTO  
PARA COMEÇAR A SUA VIAGEM NO MUNDO  
DIGITAL STRAUMANN!**

# RECEBI E AGORA, COMO PROCEDER?

*Vamos ter uma visão geral de como serão os processos*

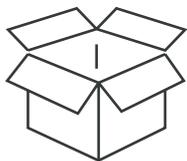

## Unpacking

Remova seu equipamento da caixa e verifique se aparentemente ele se encontra em perfeito estado.


Faça todo o processo com bastante cuidado e NÃO descarte a caixa que pode ser útil para eventuais necessidades de transporte.



## Agendamentos

Realize os agendamentos de instalação e treinamento começando pelo preenchimentos dos checklists.

Se o seu modelo for portátil, certifique-se de estar com um computador homologado em mãos. Resista NÃO configura-lo

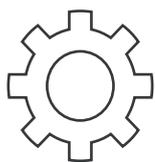

## Instalação

As licenças serão geradas nesse dia e no caso do modelo portátil o software será instalado nesse momento pela equipe.

Todo processo só pode ser realizado pela equipe de suporte, e o computador deve se manter sem NENHUMA alteração até o dia da instalação.



## Treinamento

Com a instalação realizada eu vou fazer o treinamento online e explicar todos os detalhes do início ao fim do processo.


Para o treinamento certifique-se de estar com uma boa conexão de internet, um modelo de gesso, impresso ou um manequim e no máximo com 3 participantes

## MINHA CLÍNICA DIGITAL

Enquanto aguarda a instalação e treinamento é possível acessar nossa plataforma de educação do Digital, lá você encontra todo o material sobre os equipamentos, treinamento e até mesmo webinars e serie feitas por usuários do sistema!

Inclusive para o dia do treinamento é bem interessante que já tenha assistido o treinamento do Virtuo Vivo, assim tudo fica mais fácil e claro.

**ACESSAR AGORA**

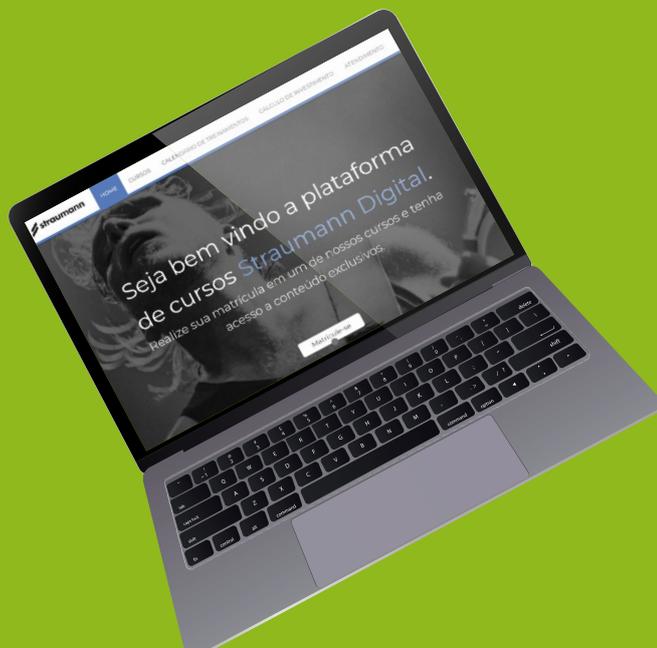

# TRILHA DO SUCESSO SCANNER INTRAORAL

01



Entrega do Equipamento  
(Adm. Digital)



Ligação/WhatsApp para  
agendamento da instalação  
e treinamento  
(Treinamento Digital)

02

03



Instalação  
(Helpdesk Digital)



Treinamento Modulo 1, via  
Skype (a partir daqui se inicia  
o uso do equipamento)

04

05



Treinamento Modulo 2,  
presencial em Ctba (Virtuo),  
em SP (Trios)



Ligação/WhatsApp para  
esclarecimento de dúvidas  
quanto ao uso  
(Treinamento Digital)

06

07



E-Learning  
[www.minhaclinicadigital.com.br](http://www.minhaclinicadigital.com.br)

# CASO JÁ QUEIRA SABER O QUE PRECISAREMOS PARA O DIA DA INSTALAÇÃO, SEGUEM OS CHECKLISTS

## INSTALAÇÃO VIRTUO VIVO POD

- Computador HOMOLOGADO pela Dental Wings para uso EXCLUSIVO\* com o Virtuo Vivo POD
- Tomada 3 pinos 110V/220V e/ou adaptador
- Team Viewer e Skype instalados no computador
- Internet Wi-fi disponível (para atualizações)
- Embalagem completa do scanner (base, cabos de energia e rede, peça de mão, ponteiros e peça de teste de integridade) – não descartar a caixa para eventual necessidade de transporte posteriormente

## INSTALAÇÃO VIRTUO VIVO CART

- Tomada 3 pinos 110V/220V e/ou adaptador
- Skype instalado em um outro computador
- Internet Wi-fi disponível (para atualizações)
- Embalagem completa do scanner (base, cabos de energia e rede, peça de mão, ponteiros e peça de teste de integridade)

# Quais são as dúvidas frequentes?



## Posso utilizar um nobreak?

Sim, o nobreak vai proteger o equipamento de possíveis variações de energia, mas essa é uma orientação, não uma exigência.

## O equipamento é bivolt?

Sim, ambas as versões são bivolt, apenas atenção para não inverter os cabos do computador com o cabo do pod, no modelo portátil.

## O Virtuo Vivo tem sensor de gestos?

O modelo Cart vem com sensor de gestos permitindo seguir o passo a passo do escaneamento sem necessidade de toque na tela

## O Virtuo Vivo tem um Sistema aberto?

Sim, os escaneamento feitos com o virtuo vivo podem ser exportados em formatos universais.

## O Virtuo Vivo tem anuidade?

Sim, o virtuo vivo tem uma pequena taxa de anuidade para manter seu funcionamento e evolução onde estão incluídas atualizações, novas versões e suporte.

## As ponteiras são substituíveis?

Sim, as ponteiras são vendidas em kits de 3 unidades e devem ser substituídas por volta de 250 ciclos de autoclavagem, ou caso tenha algum risco ou desgaste do espelho.

## Posso usar qualquer técnica de escaneamento?

Não, cada scanner tem uma técnica de escaneamento preconizada pelo seu fabricante, busque sempre seguir as orientações.

## Posso espelhar a imagem na tv?

Sim, com o compartilhamento de tela do windows é possível compartilhar a imagem em uma tv smart.

## Preciso usar afastador?

Existem pessoas que preferem escanear com afastador e outras sem, então não é uma necessidade.

## O Sistema antifog é Seguro para COVID?

Sim, o Sistema anti embaçamento do Virtuo Vivo é através de aquecimento, não gerando circulação de partículas.

## QUAIS CUIDADOS DEVO TER COM A CANETA?

- Nunca mantenha a caneta sem a ponteira (removível), pois assim protegeremos sempre a camera
- Cada ponteira aguenta em media 250 ciclos de autoclavagem, então sempre lavar, enchaguar, secar o espelho, colocar no envelope e seguir o ciclo de autoclavagem
- Nunca dobre ou force o cabo da caneta, ele é bem resistente, mas quanto mais cuidado, menor será a chance de um eventual problema
- Para limpar a camera e o espelho sempre utilize uma flanela fina ou um papel macio e absorvível



Lembre-se essa caneta foi desenvolvida baseada em nossas canetas odontológicas, então a empunhadura sempre deve ser a mesma que já estamos acostumados, dedão e indicador segurando e movimentando, dedo médio para apoio e o dedinho SEMPRE em contato com o meio externo para suporte de movimentos, assim fica mais fácil pra gente e pro software entender os movimentos.

## COM QUAL TIPO DE CASO DEVO COMEÇAR?

### A prática sempre será nossa maior aliada

Quer uma orientação minha?

Comece SEMPRE com casos menores, unitários, mais simplificados, ganhe confiança no equipamento e em sua técnica de escaneamento e vá avançando conforme for se sentindo confortável.

Lembra quando estávamos na graduação ou especialização? Começamos dos casos menores até chegarmos onde estamos hoje!



# AGORA VAMOS AVANÇAR UM POUCO NA NOSSA EVOLUÇÃO



Realizar o processo de  
agendamento



Fazer a instalação com  
a equipe de suporte



Fazer o treinamento comigo



Praticar para não passar  
aperto durante a consulta



Atender os pacientes

# POR FIM VAMOS CONHECER TODO O Sistema Chairside Straumann


Virtuo Vivo Card ou Pod



Planejamento protético com Software Chairside



Planejamento protético + Modelo com o Software Cares

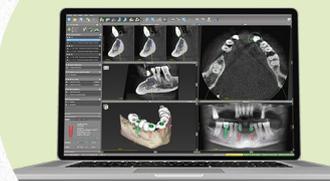

Planejamento cirúrgico com Codiagnostix Visual



Fresadora Straumann® CARES® C series



Impressora 3D Straumann® CARES® P series

# MAS NÃO PARAMOS POR AI, AINDA TEMOS CONECTIVIDADE COM A CLEARCORRECT

Com o Virtuo Vivo fazemos o envio do escaneamento direto para ClearCorrect, com passos simplificados, alinhadores em suas mãos prontinhos para o seu paciente!



Virtuo Vivo Card ou Pod



Sistema ClearCorrect



Escaneamento

Agora te convido a iniciar essa aventura de pensar cada vez mais de forma digital, teremos certamente uma curva de aprendizagem, seja esse o primeiro contato com o digital, ou até mesmo a primeira experiência com um equipamento diferente, sempre existe uma adaptação, uma mudança e um novo pensar, e juntos passaremos com dedicação e sairemos muito mais capacitados do que entramos. Estou muito feliz em fazer parte de toda essa descoberta! Por sinal, já estávamos te aguardando, então,

**Seja bem vindo ao digital Straumann.**

SIGN

TY SOFTWARE

DRUCK SCANNER

IER PLANNING

CE & SUPPORT SOFTWARE