

INSTRUÇÕES DE USO

Resinas para impressão 3D

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**1.1. Nome técnico**

Resina para impressão 3D

1.2. Nome comercial do produto

COSMOS

1.3. Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto aplicados ao seu funcionamento e ação

COSMOS é uma resina para impressão 3D para impressoras que operam com uma longitude de onda entre 250nm e 410nm.

1.4. Especificações e características técnicas**1.4.1. Composição**

Componentes
Oligômeros
Monômeros
Fotoiniciadores
Estabilizador
Pigmento

2. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco com temperaturas entre 2°C e 30°C.

3. INSTRUÇÕES DE USO

- Ao manipular o produto, recomenda-se utilizar equipamento de proteção individual, como luvas e óculos de proteção.

- Adicione uma quantidade suficiente de resina no reservatório da impressora 3D.

- Selecione o arquivo e a configuração da impressora.

- Continue com a impressão. Em impressoras não homologadas pela Yller, sugere-se imprimir inicialmente em uma peça de calibração. Veja como fazer no seguinte link: yller.com.br/parametros

- Após imprimir, submerja o dispositivo intraoral em álcool etílico, isopropílico ou solução de limpeza por 10 minutos.

- Após secar o dispositivo, realize o curado da peça em uma câmara UV de 72W por 10 minutos.

4. PRECAUÇÕES, RESTRICÕES E ADVERTÊNCIAS**4.1. Precauções**

- O produto deve ser utilizado por profissionais.
- Manter o produto fora do alcance de crianças

4.2. Restrições e Advertências

- Não usar em pessoas com antecedentes de alergia a acrilatos e metacrilatos.

5. INDICAÇÃO

COSMOS é uma resina indicada para impressão 3D.

6. CADUCIDADE

Datas de fabricação e caducidade: ver embalagem.

Yller Biomateriais S.A. não se responsabiliza por danos, de qualquer natureza, causados pelo uso indevido ou não previstos nas instruções de uso.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

YLLER BIOMATERIAIS SA

Endereço: Av. São Francisco de Paula, 3852

Tel.: +55 51 32727460

www.yller.com.br / sac@yller.com

CNPJ: 16.970.346/0001-52

Responsável técnico:

Aline de Oliveira Ogliari

CRO/RS N° 19623