



# Ceramic Implant System

---

Guia Protético

INICIAR



---

Próteses provisória  
unitária cimentada



---

Próteses unitária  
parafusada



---

Próteses unitária  
cimentadas



O Munhão CR em PEEK é uma solução protética provisória a ser usada com uma coroa provisória

Indicado para permanecer na boca por até 6 meses

Cilindro provisório compatível está disponível para facilitar a fabricação da coroa e a entrega de uma solução estética

Pode ser utilizado para manter, estabilizar e moldar o tecido mole durante a fase de cicatrização

Use a chave Neo para instalar o Munhão CR em PEEK no implante. Torque máximo: 10 N.cm.

É importante ter em mente que este pilar não pode ser instalado em oclusão e sob forças laterais.



Instalação do  
implante



Coping de impressão Munhão  
CR \ Transfer cilindro  
provisório Munhão CR



Uso híbrido: pode ser  
usado como um  
transfer de moldagem  
e um pilar provisório

## INDICAÇÃO

Prótese provisória unitária  
cimentada







O Pilar Zi cobre restaurações unitárias definitivas sistema de implante Neodent® Zi.

Ele pode ser usado com um fluxo de trabalho convencional com moldagem e injeção de cerâmica ou no sistema CAD/CAM.

Este pilar é recomendado para próteses cimentadas ou parafusadas, embora a cimentação da Base Zi deva ser realizada fora da boca do paciente, no laboratório, utilizando cimento de resina ativado quimicamente. Essa etapa elimina o risco de excesso de cimento em tecidos peri-implantares. Em seguida, a estrutura é parafusada no implantes

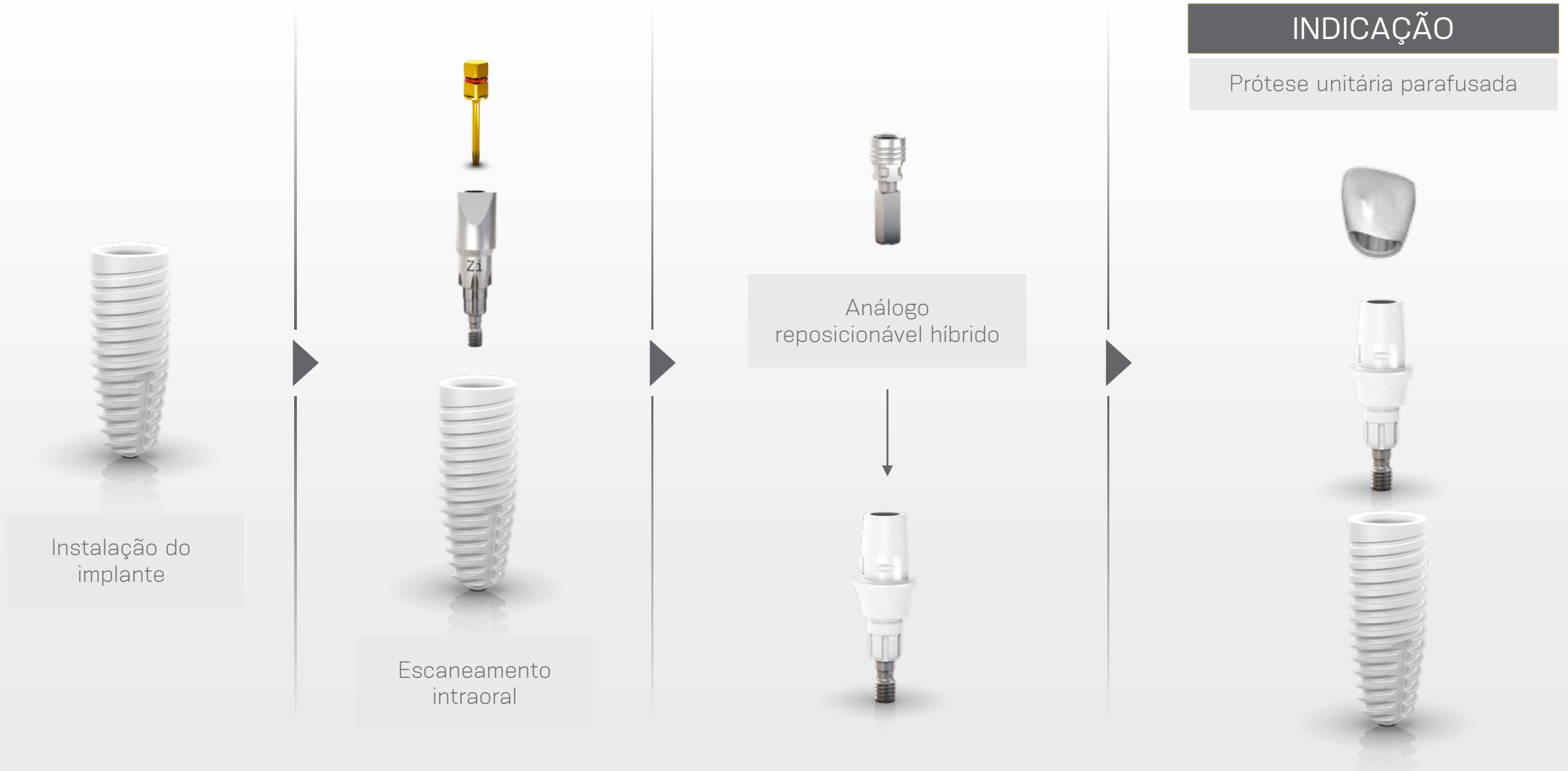



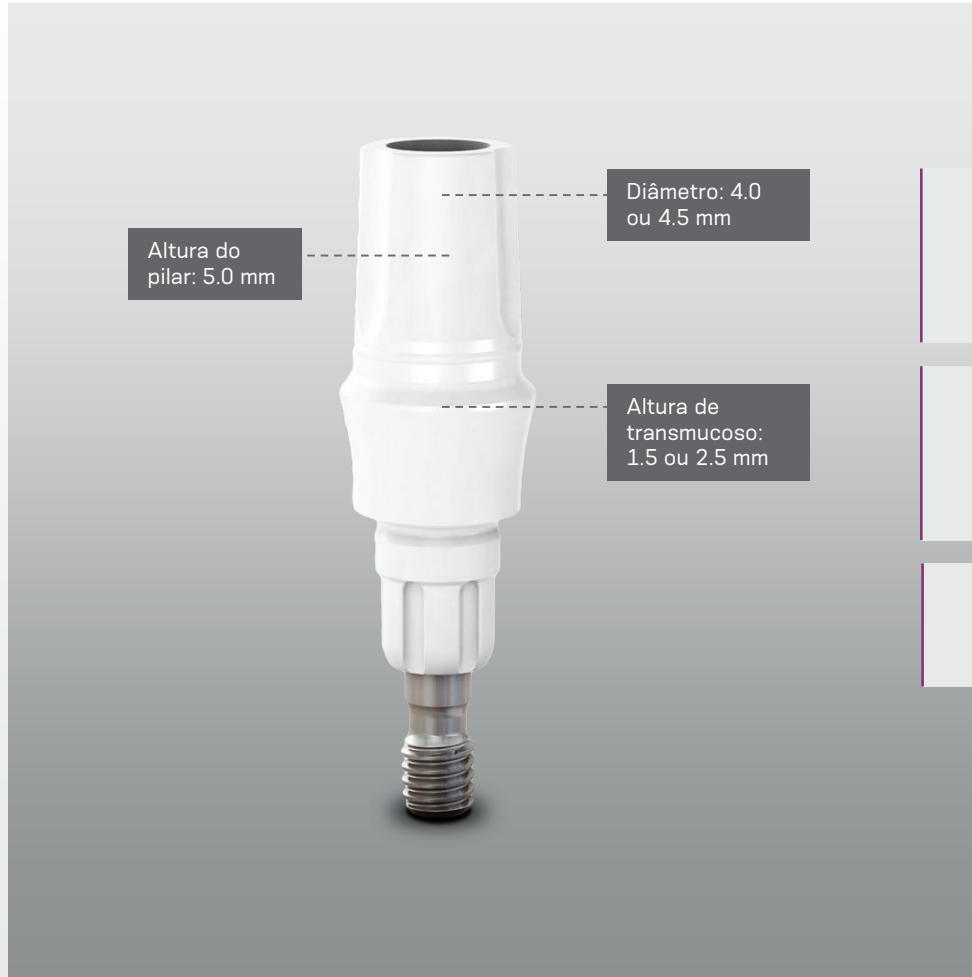

O Munhão CR de Zi é um pilar instalado sobre implantes de cerâmica Neodent a fim de fornecer suporte para restaurações protéticas, tais como cilindros ou coroas.

Pode ser utilizado para restaurações unitária que sejam mantidas em áreas estéticas sobre implantes instalados na maxila ou na mandíbula

Pode ser utilizado em um fluxo de trabalho convencional ou digital





